



MyDentalCleaner

Reinigungs- und Pflegekonzentrat zur Anwendung in Ultraschallreinigern

Für herausnehmbaren Zahnersatz, kieferorthopädische Regulierungsapparate, Sportmundschutz, Interimsprothesen, Schnarcher- und Knirscherschienen

Gebrauchsanweisung

Anwendungsgebiete

Herausnehmbarer Zahnersatz gefertigt aus Edelmetall (Gold-Silber-Platinlegierungen) mit Keramikverblendungen, Nichtedelmetall (Kobalt-Chrom-Molybdän) mit Kunststoff- oder Keramikverblendungen; Knirscher-, Schnarcherschienen, Interimsprothesen bei Implantatversorgungen, Sportmundschutz aus Kunststoffen, Kieferorthopädische Schienen oder Regulierungsapparate für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Inhaltsstoffe und Zusammensetzung

Das Konzentrat enthält Phosphorsäuremethylester und Phosphorsäure 5-15%, organische Lösungsmittel 1-5%, Tenside und Hilfsstoffe.

Dosierung

Anwendung in Ultraschallreinigern, z.B. Oxford Universal Ultraschallreiniger (baugleich mit Carrera Sinus Ultra 9611031), Carrera Dentasonic 2607 oder Dental Ultraschallreiniger 9611071

15 ml Konzentrat in den Edelstahltank geben und mit ca. 300 ml warmem oder kaltem Wasser auffüllen. Es ergibt sich eine angenehm nach Minze duftende Reinigungs- und Pflegelösung (Oxford Universal Ultraschallreiniger, Carrera Dental Ultraschallreiniger 9611071).

10 ml Konzentrat in den Edelstahltank geben und bis zur Markierung im Tank mit warmem oder kaltem Wasser auffüllen. Es ergibt sich eine angenehm nach Minze duftende Reinigungs- und Pflegelösung (Carrera Dentasonic 2607).

Die Reinigungsdauer im Ultraschallbad beträgt zwischen 3 und 5 Minuten und kann je nach Bedarf wiederholt werden. Falls notwendig mit einer weichen Zahnbürste nachreinigen. Nach dem Reinigen die Teile unter fließendem Wasser gründlich abspülen und mit einem weichen, staubfreien Tuch trocken tupfen.

Die Reinigungslösung kann je nach Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Teile 3 bis 4-mal verwendet werden. Danach sollte eine neue Lösung, wie oben beschrieben, neu angesetzt werden.

Gefahrenhinweise / Sicherheitsratschläge

Das Konzentrat reizt die Augen und die Haut. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Konzentrat nicht intraoral anwenden. Auf keinen Fall zum Mundausspülen verwenden. Bei versehentlichem Verschlucken den Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Arzt konsultieren.

Lagerung

Dicht verschlossen im Originalgebinde lagern. Lagertemperatur -5° C – 30° C. Das Produkt ist nicht entzündlich.

Haltbarkeit

Siehe Verfallsdatum auf der Flasche. Nach erstmaligem Öffnen einer Flasche ist das Konzentrat 9 Monate haltbar!

Wichtige Hinweise

Die regelmäßige Anwendung zuhause reinigt und pflegt Ihren Zahnersatz, Knirscher-, Schnarcherschienen, Sportmundschutz, Interimsprothesen und kieferorthopädische Apparate zur Zahnregulierung für ein angenehmes Mundgefühl und frischen Atem. Einmal im Quartal sollten Zahnersatz, Schienen, Sportmundschutz oder die kieferorthopädischen Apparate von Ihrer Zahnarztpraxis oder Ihrem Dentallabor professionell gereinigt und geprüft werden, um den Wert zu erhalten und die Passung zu überprüfen.

Hersteller

ALPRO MEDICAL GMBH • Mooswiesenstr. 9 • D-78112 St. Georgen

Vertrieb

MyDental GmbH • Rotehausstr. 36 • 58642 Iserlohn • E-Mail: info@MyDental.de
www.MyDentalSmile.de • www.MyDentalCleaner.de • www.MyDental.de

Stand: Juli 2014

Lieferformen: 50 ml Proberflasche, 300 ml



MyDentalCleaner

Nachbestellung Reinigungssystem

MyDentalCleaner
300 ml Flasche



16,95 €
inkl. MwSt.

Pflege- und Reinigungskonzentrat PZN 9629188
für belebende Atemfrische und strahlend saubere Zähne. Angenehm aromatisiert, einfach zu dosieren und gründlich in der Wirkung.
Menge für 30 Anwendungen.

Bestellmenge:



49,50 €
inkl. MwSt.

Carrera Dental

Ultraschallreinigungsgerät 9611071
220 V, 35 W, 50 Hz, Geräuscharme Ultraschallfrequenz 43 kHz
3 Minuten Timer, weiß
36 Monate Garantie

Bestellmenge:



39,90 €
inkl. MwSt.

Oxford Universal
Ultraschallreiniger

Ultraschallreinigungsgerät
230V / 50 Watt, Edelstahltank max. 600 ml Füllmenge, 42 KHz Schwingungen, Siebeinsatz, Uhrenbrücke, für Brillen, Schmuck, etc., Gehäuseweiß, Garantie 36 Mon.
(baugleich mit Carrera Sinus Ultra)

Bestellmenge:

Absender:

Vorname: _____

Name: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Stempel Praxis / Labor